

► **Ongewenste haargroei is voor veel mensen een probleem**

Ongewenste haargroei is voor veel mensen een probleem. Met de moderne IPL (Intense Pulsed Light) technologie is het mogelijk om haargroei fors te reduceren. Scheren, epileren, harsen en ontharing crèmes bieden slechts een tijdelijke oplossing.

Maar dankzij de nieuwe Bowie IPL technologie is het nu mogelijk om een optimaal en langdurig resultaat te bereiken bij het ontharen van vrijwel alle lichaamsdelen.


Met de nieuwste Bowie IPL techniek kunnen bijna alle huidtypen, van zeer licht tot donker, zonder problemen worden behandeld. Zo rekent u snel, effectief en duurzaam af met ongewenste haargroei. Vraag uw specialist om een persoonlijk advies.

***Zo rekent u snel,
effectief en duurzaam
af met ongewenste
haargroei.***

**IPL ONTHARING
met BOWIE IPL**

- Gezicht
- Bovenlip
- Oksels
- Bikinilijn
- Armen
- Rug
- Benen

*Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
IPL ontharing, neem dan contact op met:*

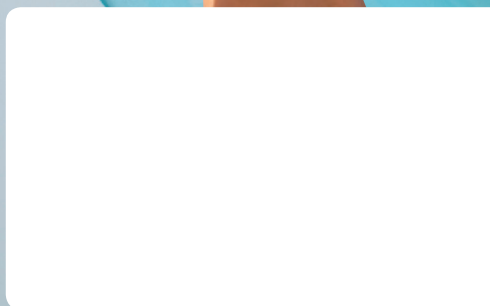

Bowie Medical BV te Oss is exclusief leverancier van de Bowie-IPL 2.0


► **ONTHAREN met
IPL-FLITSEN**

The Next Generation
IPL ONTHARING



EINDELIJK EEN ECHTE OPLOSSING VOOR ONGEWENSTE HAARGROEI

IPL flits ontharing is een bewezen techniek om definitief af te rekenen met overbeharing. Diverse wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat met de IPL licht flitsen ongewenste haren op een efficiënte, veilige en comfortabele manier kunnen worden verwijderd. De behandeling is vrijwel pijnloos en duurt niet lang. Bovendien kunnen alle lichaamsdelen behandeld worden.

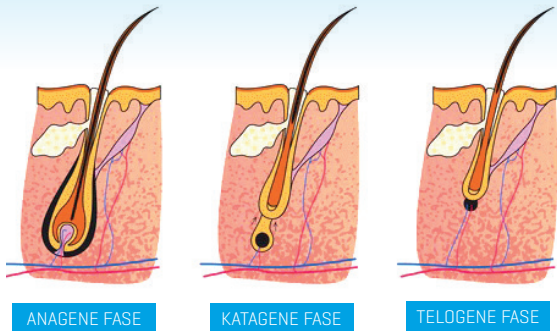

➤ Hoe werkt de Bowie IPL 2.0?

De IPL lichtflits, welke maar een fractie van een seconde duurt, richt zich op het pigment onder aan het haar. Per puls worden meerdere haartjes in een gebied van een aantal vierkante centimeters bereikt. De hoge energiepuls en daarbij vrijkomende warmte wordt door het haar geabsorbeerd en vernietigt onderhuids het haarzakje waaruit het haar groeit. Zo wordt het haar met wortel en haarzakje volledig geëlimineerd. Doordat een flits met de Bowie IPL maar heel kort duurt, en uit veilig en zichtbaar licht bestaat, is de kans op neveneffecten zeer klein en is de behandeling vrijwel pijnloos. Omdat het pigment in het haar, dat verantwoordelijk is voor de haarkleur, de energie van de IPL



moet kunnen absorberen is de behandeling van zeer licht haar (blond, grijs etc.) moeilijk en soms onmogelijk. De nieuwste perfect pulse technologie zorgt voor betere resultaten en comfortabele en pijnloze behandelingen.

➤ Voorbereiding en nazorg

Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u samen met uw IPL specialist goede afspraken maakt over het verloop van uw behandeling. Uw IPL specialist kan u adviseren over het gebruik van zonnebank of zonnebaden voorafgaand, tijdens en na de behandelingen. U mag het haar niet bleken of blonderen. Het beste kunt u stoppen met epileren, harsen of andere ontharingsbehandelingen als u kiest voor IPL ontharing. Scheren is geen probleem. Overige zaken die op het resultaat van uw behandeling van invloed kunnen zijn, worden per situatie door uw IPL specialist beoordeeld en met u besproken.



➤ Hoeveel behandelingen?

De IPL flitsen zijn het meest actief op de haren welke in de groeifase zijn.

De groeicyclus van het haar bestaat uit 3 fases:

- De anagene fase [groeifase]
- De catagene fase [regressieve fase]
- De telogene fase [rust fase].

Omdat niet alle haren zich tegelijkertijd in de groeifase bevinden zijn meerdere behandelingen nodig om een optimaal resultaat te kunnen bereiken. De volgende IPL behandeling kan pas plaats vinden als een nieuwe groep haren de groeifase heeft bereikt. Daarom wordt tussen de IPL behandelingen bij voorkeur een tussenpoos van 4 a 8 weken genomen. Gemiddeld zijn 5 tot 9 behandelingen nodig voor een optimaal eindresultaat.

De IPL flitsen zijn het meest actief op de haren welke in de groeifase zijn